

DOSTĘP NACZYNIOWY
Akcesoria do portów naczyniowych



perfusafe2

Najwyższy poziom bezpieczeństwa
Najniższy profil



Value Life

Maksimum bezpieczeństwa

Perfusafe2 jest bezpiecznym urządzeniem do stosowania z wszczepialnymi portami naczyniowymi, wyposażonym w igłę Hubera. Konstrukcja Perfusafe2 zapobiega zakłuciom powodowanym przez efekt „obicia” igły, która jest kierowana automatycznie w stronę bloku zabezpieczającego, co minimalizuje ryzyko zakłucia bez potrzeby zmiany techniki przeprowadzania zabiegu.





Intuicyjne
Technika zabiegowa
nie ulega zmianom



Zapobiega zakłuciom
Dzięki zabezpieczeniu igły



Kontrast (TK)
przystosowane do iniekcji
wysokociśnieniowych

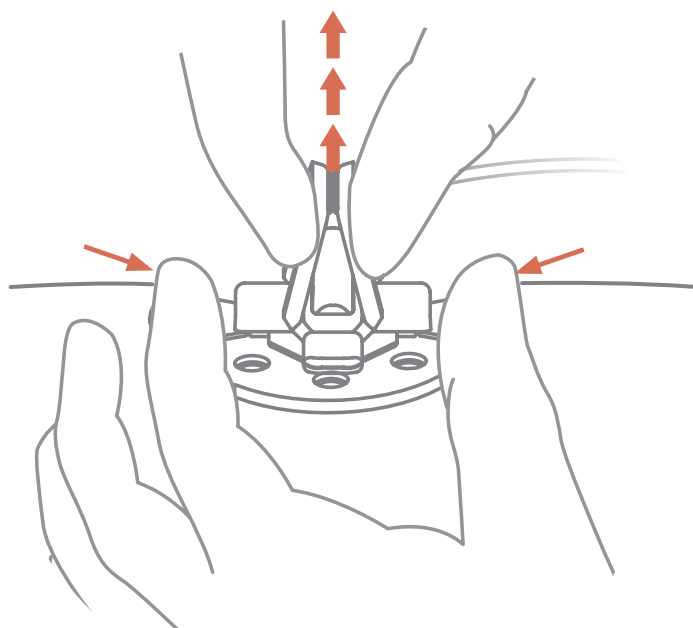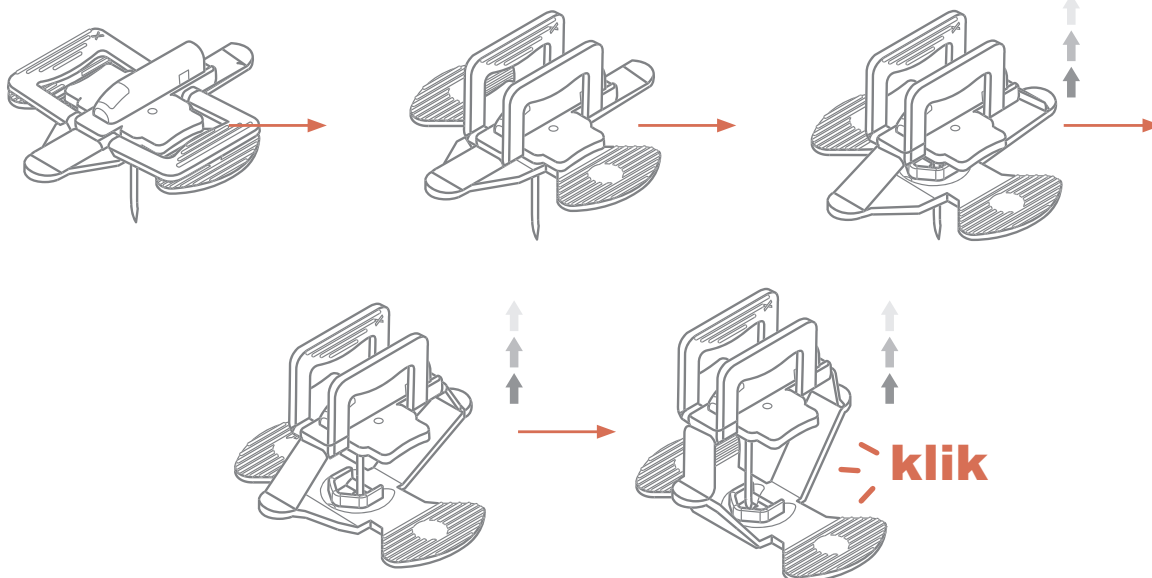

Czy wiesz, że?

Zakłucia i zakażenia


- Co roku w Europie wśród personelu medycznego ma miejsce ok. 1,2 mln zakłuć.
- W skali globalnej, 2,5% zakażeń wirusem HIV i 40% przypadków wirusowego zapalenia wątroby typu B i C wśród personelu medycznego to następstwa zakłuć.
- W roku 2010 Komisja Europejska zarekomendowała wprowadzenie do bezpiecznych urządzeń dla wszystkich pracowników ochrony zdrowia do 2012 r.

Komisja Wspólnot Europejskich, Dyrektywa Rady z dn. 26.10.2009
KOM(2009)577 wersja ostateczna

VYCON

Optymalizacja użycia

Z urządzeniem Perfusafe2 są dostępne zestawy zabiegowe standardowe oraz na zamówienie, zawierające sterylne gaziki, serwety, rękawiczki, fartuchy, maski chirurgiczne itp, które umożliwiają spełnienie najwyższych standardów sterylności w czasie zabiegów.

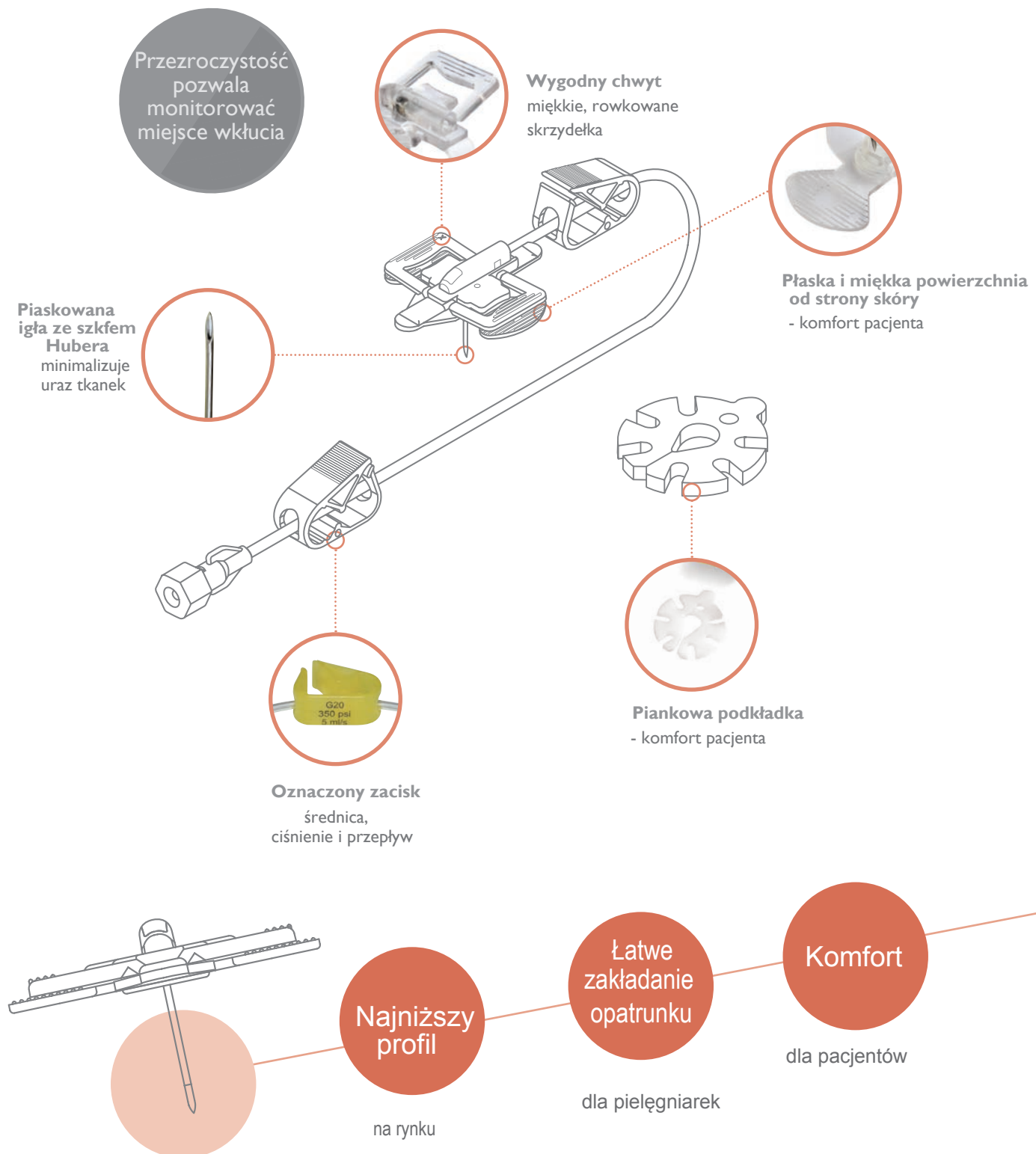

Perfusafe2 - dobór do potrzeb:

długość igły	wskazania
15 mm, 1/2"	Port wszczepiony płytko lub dla pacjentów o niskim BMI
20 mm, 3/4"	Długość standardowa
25 do 30 mm, 1 do 1 1/4"	Port wszczepiony głęboko lub dla pacjentów o wyższym BMI

rozmiar igły	wskazania
19 G	Preparaty krwio pochodne
20 G	Preparaty lipidowe: żywienie pozajelitowe...
22 G	Płyny infuzyjne niskiej lepkości, antybiotyki...

Pielęgnacja

- Codzienna kontrola miejsca wkłucia.
- Zmiana opatrunku i piankowej podkładki w przypadku zabrudzenia.
- Zmiana nie rzadziej niż co 7 dni.

Procedura

- Każdorazowo przy dostępie przez Perfusafe2 dokładnie oczyścić łącznik lub przyłącze bezigłowe roztworem alkoholu.
- Stwierdzić aspirację krwi / drożność cewnika
- Wykonać iniekcję lub podłączyć wlew.
- Przepłukać port w sposób przerywany (po 1 ml) 10 ml 0,9% roztworu NaCl lub 20 ml po żywieniu pozajelitowym lub podaniu preparatów krwio pochodnych.
- Zabezpieczyć zgodnie z procedurą stosowaną w placówce.
- Wpisać przeprowadzoną procedurę do karty pacjenta



perfusafe2
w ofercie

- z przedłużeniem prostym lub
- rozgałęzieniem Y
- z funkcją Autoflush® lub bez niej

Autoflush® to bezigłowe, zamknięte urządzenie. Autoflush® gwarantuje wypór 0,03 ml roztworu do zabezpieczenia cewnika. Autoflush® eliminuje refluks krwi do światła cewnika, zapobiegając powstawaniu niedrożności.

Instrukcja użytkowania

• Zakładanie



1. Przygotować pacjenta przestrzegając zasad aseptyki, po czym zmienić rękawiczki
2. Po wstępnym wypełnieniu Perfusafe2, unieść i przytrzymać górne skrzydełka oraz usunąć zabezpieczenie.



4. Sprawdzić aspirację krwi i przepłukać 10 ml 0,9% roztworu NaCl w sposób przerywany, po 1 ml.
5. Pod Perfusafe2 umieścić piankową podkładkę, po czym nałożyć półprzepuszczalny, przezroczysty opatrunek.



3. Przytrzymać port dwoma palcami i wprowadzić pionowo igłę w membranę, do wycucia lekkiego oporu (oparcia igły o dno komory). Należy każdorazowo zmieniać miejsce wkłucia, ze względu na stan skóry pacjenta.



• Usuwanie



1. Przepłukać Perfusafe2 10 ml 0,9% roztworu NaCl.
2. Podnieść i przytrzymać górne skrzydełka; przytrzymać port dwoma palcami pod dolnymi skrzydełkami urządzenia.



3. Pociągnąć ku górze za górne skrzydełka, przytrzymując port między dolnymi skrzydełkami a podawanym 0,9% roztworem NaCl.
4. Kliknięcie oznacza, że igła została zabezpieczona i można urządzenie wyrzucić do pojemnika na odpady ostre.
5. Założyć na miejsce wkłucia standardowy suchy opatrunek.

Specyfikacje


Nr katalogowy	Rozmiar	Ø zewn.	Długość igły	Wyposażenie	
5249.115	19 G	1,1 mm	15 mm		Z przedłużeniem prostym
5249.116	19 G	1,1 mm	15 mm	autoflush®	
5249.120	19 G	1,1 mm	20 mm		
5249.121	19 G	1,1 mm	20 mm	autoflush®	
5249.125	19 G	1,1 mm	25 mm		
5249.126	19 G	1,1 mm	25 mm	autoflush®	
5249.130	19 G	1,1 mm	30 mm		
5249.915	20 G	0,9 mm	15 mm		
5249.916	20 G	0,9 mm	15 mm	autoflush®	
5249.920	20 G	0,9 mm	20 mm		
5249.921	20 G	0,9 mm	20 mm	autoflush®	
5249.925	20 G	0,9 mm	25 mm		
5249.926	20 G	0,9 mm	25 mm	autoflush®	
5249.930	20 G	0,9 mm	30 mm		
5249.715	22 G	0,7 mm	15 mm		
5249.716	22 G	0,7 mm	15 mm	autoflush®	
5249.720	22 G	0,7 mm	20 mm		
5249.721	22 G	0,7 mm	20 mm	autoflush®	
5249.725	22 G	0,7 mm	25 mm		Z rozgałęzieniem Y
5249.726	22 G	0,7 mm	25 mm	autoflush®	
5249.730	22 G	0,7 mm	30 mm		
5250.115	19 G	1,1 mm	15 mm	autoflush®	
5250.120	19 G	1,1 mm	20 mm	autoflush®	
5250.125	19 G	1,1 mm	25 mm	autoflush®	
5250.130	19 G	1,1 mm	30 mm	autoflush®	
5250.915	20 G	0,9 mm	15 mm	autoflush®	
5250.920	20 G	0,9 mm	20 mm	autoflush®	
5250.925	20 G	0,9 mm	25 mm	autoflush®	
5250.930	20 G	0,9 mm	30 mm	autoflush®	
5250.715	22 G	0,7 mm	15 mm	autoflush®	
5250.720	22 G	0,7 mm	20 mm	autoflush®	
5250.725	22 G	0,7 mm	25 mm	autoflush®	
5250.730	22 G	0,7 mm	30 mm	autoflush®	

perfusafe2



perfusafe2
z przedłużeniem prostym

perfusafe2
z rozgałęzieniem Y i konektorem
z funkcją autoflush®

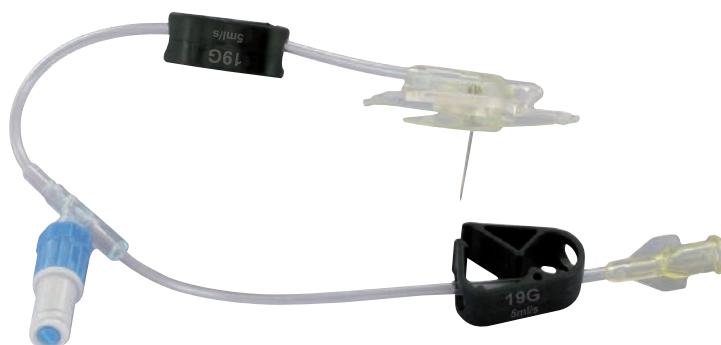

Zestaw standardowy
do zakładania igieł Hubera
Nr kat. 96.90.0526

Specyfikacje podane w tej broszurze mają cel wyłącznie informacyjny i nie stanowią oferty handlowej.
W celu uzyskania informacji prosimy o kontakt na adres mailowy: **biuro@vygon.pl**

VYGON, Polska Sp z o.o.
ul. Francuska 39/6
03-905 Warszawa
tel./fax.: (22) 617-26-97, (22) 617-18-54



www.vygon.com